

SPOSÓB UŻYCIA

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MEDYCZNY

EndoKit®

(Zestaw do leczenia kanałowego)

STOSOWANIE:

I. OSUSZ

MicroAspirator® (Jednorazowy Osuszacz Kanałów 18g)

1. Przymocuj do uchwytu HVE, zagnij dyszę pod odpowiednim kątem i osusz kanał wyciągając powietrze.
2. Wprowadź ćwiek papierowy, by sprawdzić suchość kanału. Jeśli to konieczne, kontynuuj osuszanie.
3. Po osuszeniu kanału odłącz i wyrzuć.
4. Uwaga: Ciała stałe lub lepkie płyny mogą nie przedostać się przez dyszę MicroAspiratora. Przezrzysta rurka pozwala sprawdzać, czy osuszanie ma miejsce.

II. WYLECZ

Calciject™ (Pasta z wodorotlenkiem sodu 2g): 10°C – 24°C

1. Wyjmij pojemnik Calciject z opakowania. Zdejmij zamknięcie i umieść pojemnik w pistolecie Centrix C-R®.
2. Wypróbuj na czystej powierzchni. Wyciskaj powoli używając stałej siły.
3. Wygnij igłę pod odpowiednim kątem i wprowadź do kanału.
4. Po użyciu pojemnik Calciject wyjmij i wyrzuć.

III. ZAŁÓŻ OPATRUNEK

Tempit® (Wypełnienie tymczasowe samoutwardzalne 35g): 10°C – 24°C

1. Zdejmij zatyczkę.
2. Umieść końcówkę w pistolecie C-R.
3. Umieść wacik nad warstwą Calciject.
4. Wyciśnij materiał używając niewielkiej, stałej siły i umieść go w wilgotnym otworze.
5. Uformuj wilgotnym narzędziem. Pacjent może opuścić gabinet.
6. Podczas kolejnej wizyty usuń Tempit® kolcem. Wprowadź go przez opatrunek do wacika, obróć o 45 stopni i wyjmij.

Przeznaczony do użycia w okresie do 30 dni.