

## SPOSÓB UŻYCIA

### Wyłącznie do użytku specjalistycznego

### **FluoroDose®** **(Lakier do fluoryzacji)**

#### **STOSOWANIE:**

1. Oczyszczyć zęby i usunąć nadmiar wilgoci z leczonej powierzchni.
2. Chwyć foliowe opakowanie i powoli je otwórz, odsłaniając pędzel do nakładania i pojemnik z lakierem.
3. Wyjmij pędzel i zamieszaj lakier w pojemniku.
4. Nałóż cienką warstwę lakieru na leczonej powierzchni.
5. Pozostaw do wysuszenia przez ok. 10 sekund, po czym pozwól pacjentowi zamknąć usta.
6. Po użyciu wyrzuć opakowanie i pędzel do nakładania.
7. Natychmiast po nałożeniu lakieru pacjent może opuścić gabinet. Należy poinformować pacjenta o konieczności powstrzymania się od picia gorących napojów i jedzenia twardych pokarmów przez ok. 2 godziny. Zębów nie należy szczotkować przez ok. 4 do 6 godzin.
8. Po wyschnięciu nadmiar lakieru może tworzyć plamy na zębach oraz kruszyć się z powierzchni zębów. Nie wpływa to na skuteczność leczenia, ponieważ na zębie ciągle znajduje się warstwa lakieru.

#### **PRZECIWWSKAZANIA:**

1. Wrzodowe zapalenie dziąseł lub zapalenie zęba
2. Uczulenie na fluor
3. Zapobiegać połykaniu w czasie nakładania
4. Uczulenie na kolofon lub podobne związki

#### **INTERAKCJE:**

Nie stosować, jeśli tego samego dnia stosowano fluoryzację żelem lub pianką. Należy przerwać stosowanie pastylek i płukanek fluorowych przez kilka dni po nałożeniu lakieru.

#### **REAKCJE NIEPOŻĄDANE:**

W rzadkich przypadkach odnotowano opuchliznę dziąseł, zwłaszcza przy nakładaniu na dużej powierzchni. U astmatyków, również rzadko, mogą wystąpić duszności. Pacjenci o wrażliwych żołądkach zgłaszali sporadycznie mdłości. Lakier da się łatwo usunąć przy pomocy szczotkowania i płukania.