

SPOSÓB UŻYCIA

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MEDYCZNY

GingiTrac™ Matrix (System do retrakcji dziąseł)

STOSOWANIE:

- GingiTrac™ System do retrakcji dziąseł
- REF 360040 GingiTrac Zestaw Startowy
- REF 360028 GingiTrac Zestaw Uzupełniający
- REF 360027 GingiTrac Zestaw Uzupełniający Matryca
- REF 360045 GingiCap Zestaw Uzupełniający Regular
- REF 360046 GingiCap Zestaw Uzupełniający Large
- REF 360061 GingiTrac Standard
- REF 360062 GingiTrac Plus

STOSOWANIE DO RETRAKCJI DZIAŚEŁ:

1. Przygotuj ząb jak zwykle.
2. W wypadku nadmiernego krwawienia użyj środka ściągającego.
3. Przygotowanie pojedynczego zęba: Wybierz GingiCap o odpowiednim rozmiarze i przejdź do pkt. 5
4. Przygotowywanie kilku zębów: Wyciśnij nieco GingiTrac z pojemnika bez końcówki mieszającej, by upewnić się, że baza i katalizator wyciskają się równomiernie. Nałóż końcówkę mieszającą. Wyciśnij matrycę do twardej, plastikowej formy i nałóż na zęby. Po przeciwległej stronie połóż bawełniane wałki, by zapobiec całkowitemu zamknięciu. Matryca wiąże się w ciągu 30 sekund. Wyjmij, wypłucz i wysusz.
5. Nałóż końcówkę mieszającą na pojemnik GingiTrac, wyciśnij nieznaczną ilość środka, by upewnić się, że baza i katalizator wyciskane są równomiernie. Wyrzuć wyciśnięty materiał.
6. Nałóż dołączoną do opakowania końcówkę aplikatora na końcówkę mieszającą. Nałóż materiał do retrakcji prosto do kieszonki dziąsłowej, wokół przygotowywanego zęba przy użyciu końcówki aplikatora.
7. Nałóż GingiTrac do środka GingiCap lub matrycy i umieść je na przygotowywanych zębach.
8. Poleć pacjentowi, by zagryzł z pewną, ale nie przesadną siłą. Oczekaj 3 do 5 minut, w zależności od intensywności krwawienia lub wysięku, by dokonać retrakcji.
9. Wyjmij zestaw GingiTrac, sprawdź, czy dokonano całkowitej retrakcji. Jeśli to konieczne, powtórz punkty 7 i 9.

10. Jeśli to konieczne, delikatnie opłucz i osusz przygotowywane zęby. Można dokonać wycisku.

- **GingiTrac™ nie jest masą wyciskową**
- **Pozostaw końcówkę mieszającą na pojemniku aż do następnego użycia**
- **Pojemniki przeznaczone są do użycia z pistoletem mieszającym DS50 4:1/10:1**
- **Przy stosowaniu GingiTrac™ nie należy nakładać rękawiczek gumowych ani lateksowych**