

## Access Crown – materiał kompozytowy, bys-akrylowy do koron i mostów tymczasowych



### Szybciej. Łatwiej. Inteligentniej.

Access Crown wiąże się w ciągu 60 sekund, zachowując elastyczność. Łatwo się usuwa, nie niszcząc się. Oszczędność czasu dla lekarza i pacjenta.

Jedynie Access Crown zapewnia największą ilość odcieni i najkrótszy czas wiązania. Nie istnieje szybszy i łatwiejszy w stosowaniu tymczasowy materiał kompozytowy typu bys-akrylowego. Po związaniu zachowuje elastyczność i może zostać usunięty z pola protetycznego zaledwie po minucie.

Główna zaleta kliniczna materiałów kompozytowych typu bys-akrylowego polega na ich elastyczności w czasie polimeryzacji. "Pamięć" elastyczna Access Crown pozwala na zdejmowanie go z miejsc przewieszonych lub powierzchni nierównoległych bez utraty kształtu pierwotnego.

- Idealna poręczność – wiąże się w jamie ustnej w ciągu sześćdziesięciu sekund
- Słaba kontrakcja w czasie polimeryzacji, słabe uwalnianie temperatury, wysoka odporność na ściskanie
- Wysoka stabilność koloru, nie plami się, kontrastuje na zdjęciach rentgenowskich
- W najpopularniejszych odcieniach systemu Vita\*, dodatkowo odcień "bleach" (wybielony)
- 40% mniej strat dzięki użyciu najcieńszych końcówek mieszających
- Nie zawiera MMA: nie ma nieprzyjemnego smaku i zapachu
- Możliwa naprawa płynnym kompozytem
- Łączy się z cementami zawierającymi eugenol jak i tymi bez eugenolu
- Wysoka stabilność polimeru
- Można używać z pistoletem 1:1, jak również z pistoletem do masy wyciskowej

Compressive strength .....	200 Mpa
Transverse strength .....	95 Mpa
Vickers hardness.....	23
Linear polymerization shrinkage.....	0,18%



Przygotuj ząb



Wyciśnij do formy wyciśniętej przed przygotowaniem zęba



Access Crown przyjmuje półelastyczną konsystencję by łatwo było wyjąć koronę



Wykończ narzędziami do kompozytów i napraw kompozytem w płynie



Całkowicie związany po dwóch i pół minuty