


CENTRIX **Encore**® D/C MiniMix®

OD WIĄZANIA TRZPIENI DO REKONSTRUKCJI TRZONU ZĘBA

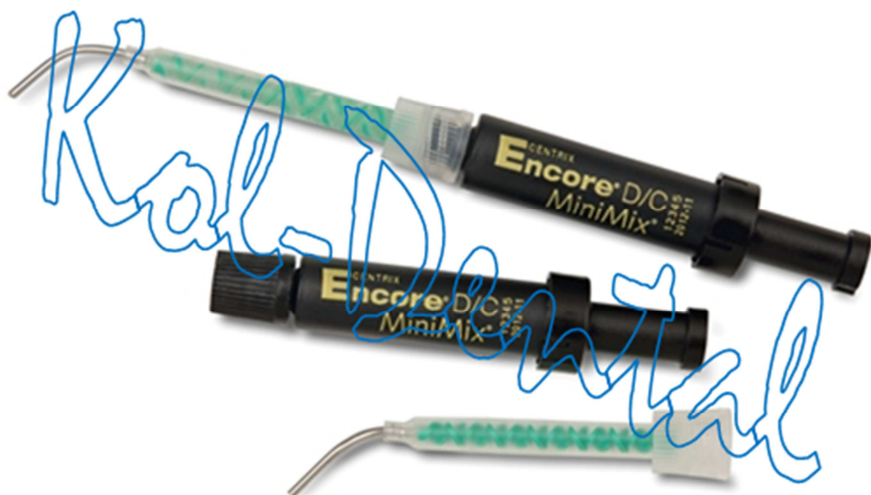

**Jedyny core build-up w
zestawie samomieszczącym**

ZALETY:

- Nie wymaga utwardzania w warstwach.
- Bardziej wytrzymały niż materiały kompozytowe do wypełnień.
- Mniejsza kontrakcja podczas utwardzania niż w wypadku materiałów kompozytowych do wypełnień.
- Szybki w stosowaniu.
- Bez konieczności stosowania matryc.
- W wierceniu ma właściwości podobne do zębiny, nie powstają rysy.
- Bez konieczności ręcznego mieszania składników.
- Oszczędność czasu.
- Niskie koszty.
- Mniejszy stres u pacjenta.
- Niezmiennie wysoka jakość bez kompromisów.
- Dostępny w dwóch kolorach: naturalnym i kontrastowym.
- Do wiązania trzpieni szklanych, tytanowych lub węglowych.

STOSOWANIE:



Usuń opatrunek z kanału na kilka milimetrów, poszerzając go w kierunku komory zęba



Odmineralizuj i nałóż system wiążący, by mieć pewność wypełnienia także kanalików zębinowych



Nałóż system wiążący na trzpień



Wprowadź preparat Encore D/C Minimix do światła kanału



Wprowadź trzpień do światła kanału



Kontynuuj rekonstrukcję preparatem Encore D/C Minimix wokół trzpienia bez konieczności tworzenia warstw. Utwardź. Oszlifuj do uzyskania trzonu.

Uwaga: Używany **system wiążący** powinien być **dwuskładnikowy** (klej i aktywator) by mógł polimeryzować także bez dostępu światła. Całkowita polimeryzacja następuje w ciągu pięciu minut.



Encore D/C® MiniMix™, 12 naboï (24 końcówki mieszające i aplikator)
Encore D/C® MiniMix™, 36 naboï (72 końcówki mieszające i aplikator)